

Dokumentnamn Provtagningsanvisning - Histopatologiska preparat i allmänhet			Identitet STÖ-30884	Säkerhetsklass K1R1T1	
Dokumenttyp Stödjande	Dokumentkategori Rutin	Gäller för S:t Eriks Ögonsjukhus	Skapat 2018-02-06	Senast uppdaterat 2021-03-01	Sida 1 (2)
Dokumentägare Stefan Seregard		Granskare Marianne Georgsson	Dokumentförfattare Marianne Georgsson		

## Provtagningsanvisning - Histopatologiska preparat i allmänhet

*Kliniskt Patologiskt laboratorium*  
Tel 08-6723175  
*histopatologen.sankterik@sll.se*

<b>Bakgrund</b>	Denna anvisning beskriver kortfattat hanteringen av prover som tas i samband med operation för att undersökas vid sjukhusets histopatologiska laboratorium. Anvisningen riktar sig till personal som arbetar vid operation.
<b>Metod</b>	Histopatologi
<b>Provtagning</b>	Fixerat prov. E nukleation eller px
<b>Fixering</b>	4% buffrad formaldehyd i rumstemperatur
<b>Tillvägagångssätt</b>	Burk med vid öppning. Fixeringsvätska <b>minst</b> 10 ggr preparatvolymen. <b>Vid misstanke om talgkörtelcancer:</b> En 4 mm stans eller 2 stycken 2 mm stansar tagna intill varandra som läggs i samma burk.

### Viktigt att tänka på:

- Prov ska alltid åtföljas av ifylld remiss. Remissen måste vara fullständigt ifylld med patientens fullständiga personnummer, namn, provtagningsdatum, kombikod, klinik samt med remitterande läkarens namn. **Skriv tydligt!**
- Vid snabbsvar eller önskan om svar per telefon, måste "bemannat" telefonnummer anges på remissen. Ring innan och kontrollera att ansvarig patolog är i tjänst.

- Remissen ska vara ifylld med anamnes och preparatets natur. Även frågeställning/misstänkt diagnos och tidigare behandling ska anges på därför avsedd plats.
- Prov som saknar identitetsuppgifter på burk eller remiss undersöks inte.
- Mycket små biopsier läggs med fördel på filtrerpapper.
- Anpassa burkens storlek och mängden formalin efter preparat (minst 10x preparatets volym) ex vid bulber och stora hudar.
- Om preparatet märks med sutur ska den inte knytas hårt! **Notera på remissen var suturen sitter.**
- **Prov och remiss skickas till:**

Klinisk Patologi, plan 6  
S:t Eriks Ögonsjukhus  
Box 4078, 17104 Solna

### **Blodsmitta**

Ska anges med etikett märkt "Blodsmitta" på både prov/provtagningskärl och remiss.